

Caya® passt auch zu Ihnen.

Das **Caya®** Diaphragma ist ein Verhütungsmittel für alle Frauen, die natürlich und sicher verhüten wollen.

Es ist besonders geeignet für Frauen:

- die hormonfrei verhüten wollen oder müssen (z. B. bei erhöhtem Thromboserisiko)
- die keine Spirale benutzen wollen oder dürfen
- in der Stillzeit
- die nur dann verhüten wollen, wenn sie Sex haben
- nach einer Entbindung / zwischen zwei Schwangerschaften
- die eine Latexallergie haben
- in Kombination mit natürlichen Methoden der Familienplanung (z. B. symptothermale Methode)

Kontraindikationen:

- innerhalb der ersten 6 Wochen nach einer Entbindung
- bei starker Absenkung des Beckenbodens / Gebärmutter-senkung
- wenn beim herkömmlichen Diaphragma 60 mm oder 85 mm und größer benutzt wurde

Hinweis:

Caya® schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Das **Caya®** Diaphragma ist frei verkäuflich in Apotheken erhältlich.

Es wird empfohlen **Caya®** immer in Kombination mit dem kontrazeptiven **Caya®** Gel anzuwenden.

Vorteile vom Caya® Diaphragma

- hormonfrei
- einfache Handhabung - vergleichbar mit einem Tampon
- keine Nebenwirkungen
- wiederverwendbar: 2 Jahre lang
- latexfrei
- kein Anpassen erforderlich
- ökologisch und ökonomisch
- keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen beider Partner
- immer nur dann anzuwenden, wenn es notwendig ist
- zusammen mit dem Verhütungsgel bietet es **dreifache Sicherheit:**
 - Silikonmembran: mechanische Barriere
 - Zellulose im Verhütungsgel: weitere mechanische Barriere
 - saurer pH-Wert (3,8) des Verhütungsgels

Das **Caya®** Diaphragma erhalten Sie zusammen mit:

- Gebrauchsanleitung
- DVD
- Aufbewahrungsdose



Caya® contoured diaphragm

PZN 09224698
Preis: 33,95€ UVP



Caya® diaphragm gel

PZN 02950119
Preis: 9,95€ UVP

Erhältlich in Apotheken
und im Fachhandel



Das neue
Diaphragma.
Das passt zu mir!

Caya® contoured diaphragm

Hormonfrei -
anatomisch geformt -
passgenau und sicher.



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.medintim.de


CE 0483
Medizinprodukt

Weitere
Informationen
www.caya.eu



Caya® *contoured diaphragm*

Verhüten mit dem Caya® Diaphragma

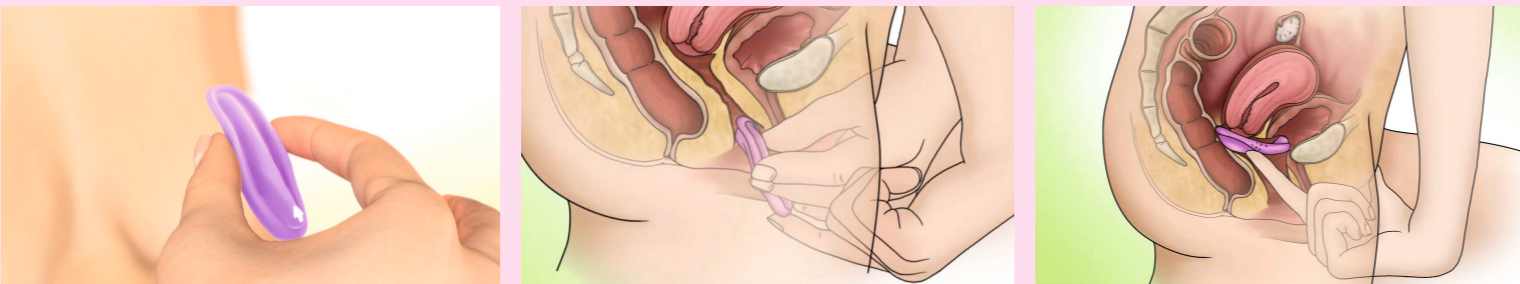

Viele Frauen wünschen sich eine natürliche und sichere Verhütung – ohne Hormone!


Mit dem neuen **Caya®** Diaphragma verhüten Sie sicher und selbstbestimmt, dann wenn Sie es brauchen. **Caya®** wird vor dem Sex wie ein Tampon in die Scheide eingeführt. Es bedeckt den Muttermund vollständig und liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische am Schambein. Beim und nach dem Sex verhindert **Caya®** das Eindringen von Spermien in die Gebärmutter. Nach dem Verkehr muss das **Caya®** Diaphragma mindestens 6 Stunden in der Scheide verbleiben.

Weitere Informationen unter: www.caya.eu

Was ist neu: die anatomische Form!

Das Caya® Diaphragma ist ein neues **Barriere-Verhütungsmittel**.

Es ist anatomisch und ergonomisch geformt und passt daher den meisten Frauen.

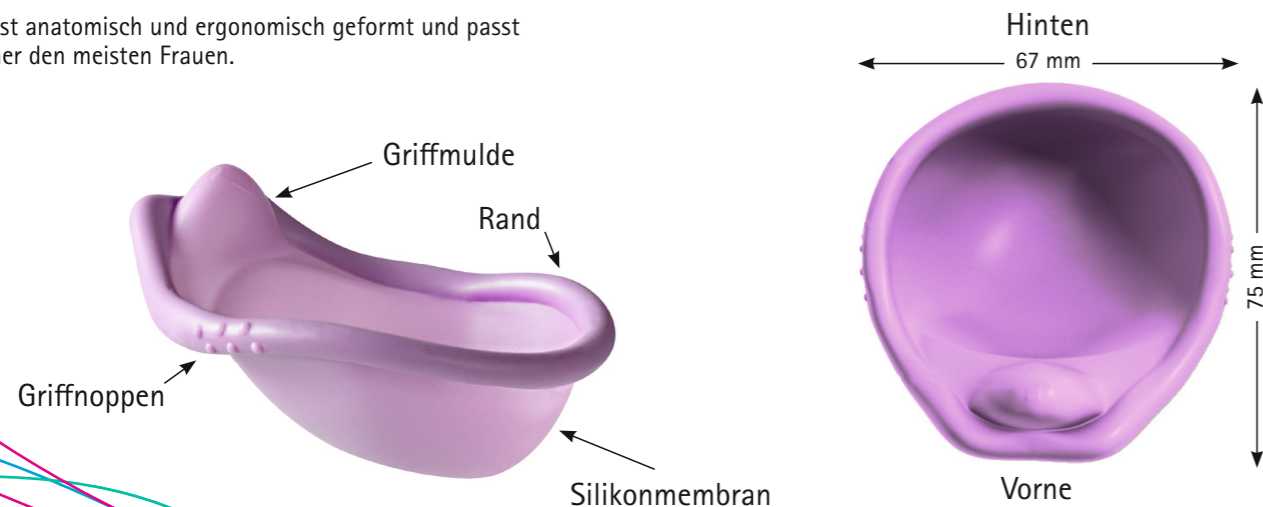

- **Silikonmembran:** hauchdünn, bedeckt die den Muttermund vollständig. Beim Sex nicht zu spüren.
- **Rand:** flexibel, verleiht dem Diaphragma Stabilität und unterstützt das Einführen des Diaphragmas in die Scheide. Der Rand sorgt für den Halt und gewährleistet die richtige Positionierung des Diaphragmas.
- **Griffnoppen:** Orientierungshilfe für das Einführen. An diesen Stellen wird das Diaphragma mit leichtem Fingerdruck gefaltet.
- **Griffmulde:** erleichtert das Entfernen des Diaphragmas aus der Scheide.

Caya® Diaphragma und Caya® Gel garantieren Sicherheit!

Dreifache Sicherheit mit Caya®

- Die Silikonmembran ist die mechanische Barriere direkt vor dem Muttermund. Der feste Rand des **Caya®** Diaphragmas schließt den Muttermund sicher ab.
 - Das **Caya®** Verhütungsgel enthält u. a. auch Zellulose, die eine weitere mechanische Barriere direkt am Muttermund darstellt.
 - Durch die enthaltene Milchsäure hat das **Caya®** Gel einen sauren pH-Wert, der die Spermien deaktiviert.
- Gleichzeitig wirkt sich dieser pH-Wert positiv auf die Vaginalflora aus und schützt vor vaginalen Infektionen.

Sicherheit, die einfache Anwendung und der Tragekomfort von **Caya®** wurden in klinischen Studien bewiesen.¹⁻⁴

Caya®



Referenzen

- 1 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm: anatomical consideration and corroboration with clinical fit. *Contraception* 2007; 76:238-244
- 2 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. *Contraception* 2008; 78:237-244
- 3 Coffey P, Kilbourne-Brook M, Brache V, Cochón L, et al. Comparative acceptability of the SILCS and Ortho ALL-FLEX® diaphragms among couples in the Dominican Republic. *Contraception* 2008; 78:418-423
- 4 Coffey P, Kilbourne-Brook M, Beksinska M, Thongkrajai E, et al. Short-term acceptability of a single-size diaphragm among couples in South Africa and Thailand. *J Fam Plann Reprod Health Care* 2008;34(4):233-236