

WEPA Warzenverveiser

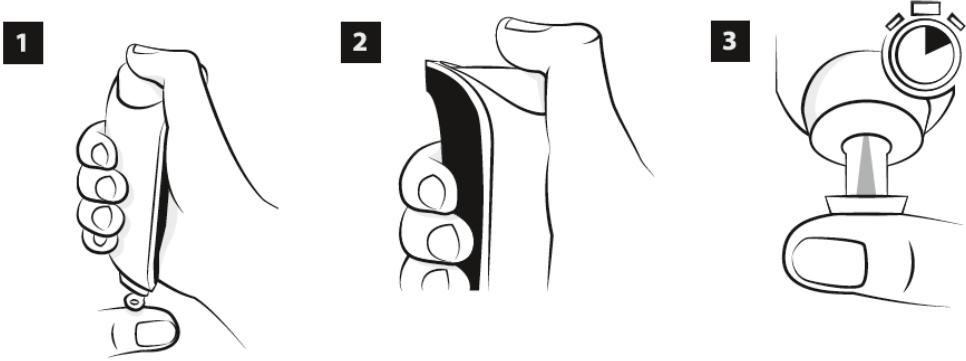
Artikelbezeichnung	WEPA Warzenverveiser
Artikelnummer	042900
PZN	15387602
Empf. AVP	16,95 €
Wofür wir WEPA Warzenverveiser angewendet?	<ul style="list-style-type: none"> • WEPA Warzenverveiser kann zur Entfernung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen verwendet werden.
Packungsinhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Dose mit 35 ml Kältegas (Dimethylether) • 10 Schutzpflaster • Gebrauchsanleitung
Inhaltsstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Dimethylether
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene und Kinder ab 4 Jahre
Anzahl Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt reicht für 10 Behandlungen
Anwendungs-/Behandlungsdauer	<ul style="list-style-type: none"> • Gewöhnliche Warzen an den Händen sind für 10 Sekunden zu besprühen. • Bei Dornwarzen (an den Füßen) wird eine Behandlungsdauer von max. 15 Sekunden empfohlen, wenn die Haut schwierig ist, z. B. an den Fußsohlen. • Befindet sich die Warze oben oder seitlich am Fuß oder an einem Zeh, beträgt die Behandlungsdauer 10 Sekunden.



TABELLE ZUR BESTIMMUNG DER BEHANDLUNGSDAUER:

	Hand	Fuß <ul style="list-style-type: none"> • Innenseite der Fußsohle • Zehen • Oben oder seitlich am Fuß 	Fuß <ul style="list-style-type: none"> • Fußballen • Ferse
	10 Sekunden	10 Sekunden	max. 15 Sekunden

WEPA Warzenverveiser

Artikelbezeichnung	WEPA Warzenverveiser
Artikelnummer	042900
PZN	15387602
Wie wirkt WEPA Warzenverveiser?	<ul style="list-style-type: none">• WEPA Warzenverveiser vereist die Warze mithilfe eines Vereisungssprays mit direkter kontinuierlicher Abgabe. Kryotherapie (Warzenvereisung) ist eine von Ärzten und Dermatologen häufig angewendete Methode. WEPA Warzenverveiser bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Entfernung von Warzen. Es kann die Warze bis zum Kern mit einem präzisen Sprühstrom von Kältegas vereisen. Nach der Behandlung fällt die Warze in der Regel innerhalb von 10–14 Tagen ab.
Wie wird WEPA Warzenverveiser angewendet?	<ol style="list-style-type: none">1. Halten Sie die Düse auf die Warze, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Düse fest auf der umliegenden Haut anliegt und stützen Sie Ihren Arm auf dem Tisch ab. Auf diese Weise können Sie den Sprühstrom genau auf die Behandlungsstelle richten.2. Drücken Sie mit dem Daumen langsam auf den Behälter.3. Besprühen Sie die Warze ununterbrochen für die angemessene Behandlungsdauer (10 oder 15 Sekunden), wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben. <div style="text-align: center;"></div>